

創新專利技術 無添加溶劑 有效、安心、舒適



第一階段

TAICEND 防水不沾黏傷口敷料(滅菌)

- 共3片 - 手術後(含手術當天) 每兩天更換一片

結構專利的泡棉敷料, 吸收術後傷口滲出液且不回滲, 傷口保持濕潤且乾淨, 避免感染。



第二階段

TAICEND 術後敷料(滅菌)

- 共5片 - 拆線後(含拆線當天) 每周更換一片

內層膠體柔軟、高延展性, 有效閉合手術後傷口, 舒緩活動拉扯時造成的疼痛, 加速深層傷口癒合。舒適、低敏, 可連續使用不間斷。



第三階段

TAICEND 疤痕貼片(未滅菌)

- 共5片 - 傷口癒合後, 每周更換一片

適當的下壓力, 抑制疤痕增生, 提供疤痕與周圍皮膚適度保濕, 軟化疤痕。舒適、低敏, 可連續使用不間斷。

此產品可由商業保險給付,
請洽詢您的保險顧問

加入我們獲得最新資訊

加入我們的
粉絲專頁

LINE@ 加入好友



貼得久

防水隔離、低敏、透氣、柔軟舒適

常見問題

問：對舊的疤痕是否有效？

答：若為6個月以上成形的疤痕, 因疤痕組織已增生, 持續使用疤痕貼片具有部份軟化淡化疤痕的功效, 但無法完全消失。

問：如果我有蟹足腫體質仍然有效果嗎？

答：蟹足腫體質的產婦, 傷口容易在3個月~6個月內產生增生性疤痕, 因此強烈建議依循使用時機, 並持續使用到6個月以上, 才可降低疤痕突起的機會。

問：TAICEND術後照護系列產品何時可使用？

答：從手術傷口到疤痕護理全療程照護, 從手術當天按不同階段的療程, 持續使用六個月。對疤痕的紅、腫、色素沉澱皆可改善, 並有軟化、淡化、減少疤痕的功效。

問：TAICEND術後照護系列產品會不會產生過敏？

答：全系列採醫療級聚氨酯製成, 親膚、透氣、不易產生過敏, 可持續使用。若使用過程中感受不適, 請適時清理傷口及周圍或諮詢醫師。

產品規格

TAICEND
防水不沾黏
傷口敷料
(滅菌)



3片/盒

敷料 防水膜

○ 3x17 cm	6x21 cm 大
○ 4x21 cm	8x25 cm 加長
○ 5x17 cm	8x22 cm 加寬

TAICEND
術後敷料
(滅菌)



5片/盒

敷料 防水膜

○ 3x17 cm	6x21 cm 大
○ 3.5x20 cm	8x25 cm 加長

TAICEND
疤痕貼片
(未滅菌)



5片/盒

敷料 防水膜

○ 3x17 cm	6x21 cm 大
○ 3.5x20 cm	8x25 cm 加長

泰陞國際科技股份有限公司
www.taicend.com
+886-7-6955313



剖腹產術後傷口照護

26週完美呈現


高市衛醫器廣字第10706005號

適用於 剖腹產術後 1 2 3 使用之術後敷料及疤痕貼片

-剖腹產傷口的照護是一個療程,分為以下三個階段


STAGE 1 住院期

止血發炎期

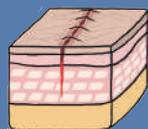


STAGE 2 坐月子期

增生期

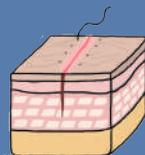

STAGE 3 正常生活期

成熟期

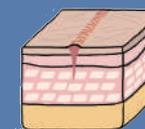

《 完全吸出滲液，傷口乾淨不發炎 》

- ✓ 完全吸出滲出液
- ✓ 降低感染機率

《 閉合傷口減少拉扯，促進傷口癒合 》

- ✓ 閉合傷口減少活動造成的拉扯
- ✓ 保護術後傷口，促進傷口癒合

《 提供保濕及下壓力，把握抗疤黃金期！ 》

- ✓ 提供保濕環境，軟化疤痕
- ✓ 施予下壓力，避免疤痕凸出

STAGE 1 防水不沾黏 傷口敷料 (滅菌)

- ✓ 服貼傷口
- ✓ 吸收滲出液
- ✓ 不沾黏傷口



STAGE 2 術後敷料 (滅菌)

- ✓ 密閉保護
- ✓ 閉合力
- ✓ 透氣不沾黏



STAGE 3 疤痕貼片 (未滅菌)

- ✓ 高保濕
- ✓ 下壓力
- ✓ 舒適低敏



使用週數

第1週
每兩天更換一片

第 2-6 週
每週更換一片

第 7-26 週
每週更換一片